

ДОЗАТОР З ЗВОЛОЖУВАЧАЕМ



- 1 Дозатор кисневий
- 2 Конектор системи AGA або DIN
- 3 Ручка регуляція потоку
- 4 Зволожувач до дозатора

ПАРАМЕТРИ ДОЗАТОРА

- Вихідний тиск 0,5 МПа.
- Діапазон показань тиску 5 бар +/- 0,5 бар.
- Діапазон регулювання подачі 0-17 л/хв. або 0-6 л/хв.
- Пляшка зволожувача ємністю 250мл.
- Мін. кількість води дистильованої для зволоження 70мл.
- Макс. кількість води дистильованої для зволоження 150мл.
- Температура стерелізації:
 - Полікарбонатна пляшка 120 С
 - Скляні пляшка 121-134 С
- Споживання близько 12 мл./год. води при подачі газу 17літ./хв.
- Вологість газу (якщо потрібно зволоження) 0-60%.
- Похибка показань +/- 10%.

ФУНКЦІЇ

- Вимірювання і показник подачі при підключенні до концівок в системі газопроводу медичних газів.
- Регулювання подачі газу за допомогою ручки.
- Зволоження газу водою дистильованою в процесі дозування.

МОНТАЖ

Дозатори можуть бути встановлені до пунктів видачі газу за допомогою конекторів AGA, DIN, G01, BS, NF, Chemerton. На рейку типу Modura за допомогою кріплень самозажимних.

ДОЗАТОР З ЗВОЛОЖУВАЧЕМ

	ІНДЕКС
Дозатор діапазон 0-6л/мін, монтований до пункту видачі AGA	DTM 03 01 01
Дозатор діапазон 0-6л/мін, монтований до пункту видачі DIN	DTM 03 01 02
Дозатор діапазон 0-17л/мін, монтований до пункту видачі AGA	DTM 04 01 01
Дозатор діапазон 0-17л/мін, монтований до пункту видачі DIN	DTM 04 01 02
Дозатор діапазон 0-17л/мін, монтований до пункту видачі G01	DTM 04 01 03
Дозатор ротаметричний діапазон 0-17 л/мін, монтований пунктів видачі AGA зі зволожувачем ємністю 250 мл.	DTM 04 01 07
Дозатор ротаметричний діапазон 0-17 л/мін, монтований пунктів видачі DIN зі зволожувачем ємністю 250 мл.	DTM 06 01 02
Дозатор із зволожувачем, діапазон 0-17 л /хв з редуктором тиску для кисню на пляшці із з'єднувачем AGA	DTM 04 01 05

ДОЗАТОР З ЗВОЛОЖУВАЧЕМ

	ІНДЕКС
Дозатор діапазон 0-6л/мін, монтований на рейці MODURA/DIN в комплекті з кріпленням, шлангом і конектором кутовим AGA	DTM 03 02 10
Дозатор діапазон 0-6л/мін, монтований на рейці MODURA/DIN в комплекті з кріпленням, шлангом і конектором кутовим DIN	DTM 03 02 11
Дозатор діапазон 0-6л/мін, монтований на рейці MODURA/DIN в комплекті з кріпленням, шлангом і конектором кутовим G01	DTM 03 02 12
Дозатор діапазон 0-17л/мін, монтований на рейці MODURA/DIN в комплекті з кріпленням, шлангом і конектором кутовим AGA	DTM 04 02 10
Дозатор діапазон 0-17л/мін, монтований на рейці MODURA/DIN в комплекті з кріпленням, шлангом і конектором кутовим DIN	DTM 04 02 11
Дозатор діапазон 0-17л/мін, монтований на рейці MODURA/DIN в комплекті з кріпленням, шлангом і конектором кутовим G01	DTM 04 02 12



ДОЗАТОР 3 ЗВОЛОЖУВАЧАЕМ ПОДВІЙНИ



ПАРАМЕТРИ ДОЗАТОРА

- Плавне регулювання потоку газу ручкою
- Вихідний тиск 0,5 Мра
- Різьблення UNF 9/16"
- Пляшка зволожувача ємністю 250мл.
- Мін. кількість води дистильованої для зволоження 70мл.
- Макс. кількість води дистильованої для зволоження 150мл.
- Температура стерелізації:
 - Полікарбонатна пляшка 120 С
 - Скляні пляшка 121-134 С
- Споживання близько 12 мл./год. води при подачі газу 17літ./хв.
- Вологість газу (якщо потрібно зволоження)0-60%.
- Похибка показань +/- 10%.

ДОЗАТОР 3 ЗВОЛОЖУВАЧЕМ

ІНДЕКС

Дозатор діапазон 2 x 0-6л/мін, монтований до пункту видачі AGA	DTM 07 01 01
Дозатор діапазон 2 x 0-6л/мін, монтований до пункту видачі DIN	DTM 07 01 02
Дозатор діапазон 2 x 0-6л/мін, монтований до пункту видачі G01	DTM 07 01 03
Дозатор діапазон 2 x 0-17л/мін, монтований до пункту видачі AGA	DTM 08 01 01
Дозатор діапазон 2 x 0-17л/мін, монтований до пункту видачі DIN	DTM 08 01 02
Дозатор діапазон 2 x 0-17л/мін, монтований до пункту видачі G01	DTM 08 01 03

ДОЗАТОР 3 ЗВОЛОЖУВАЧЕМ

ІНДЕКС

Дозатор діапазон 2 x 0-6л/мін, монтований на рейці MODURA/DIN в комплекті з кріпленням, шлангом і конектором кутовим AGA	DTM 08 04 01
Дозатор діапазон 2 x 0-6л/мін, монтований на рейці MODURA/DIN в комплекті з кріпленням, шлангом і конектором кутовим DIN	DTM 08 04 02
Дозатор діапазон 2 x 0-6л/мін, монтований на рейці MODURA/DIN в комплекті з кріпленням, шлангом і конектором кутовим G01	DTM 08 04 03
Дозатор діапазон 2 x 0-17л/мін, монтований на рейці MODURA/DIN в комплекті з кріпленням, шлангом і конектором кутовим AGA	DTM 08 02 01
Дозатор діапазон 2 x 0-17л/мін, монтований на рейці MODURA/DIN в комплекті з кріпленням, шлангом і конектором кутовим DIN	DTM 08 02 02
Дозатор діапазон 2 x 0-17л/мін, монтований на рейці MODURA/DIN в комплекті з кріпленням, шлангом і конектором кутовим G01	DTM 08 02 03